



AUTO PROTECT



Les aiguilles mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pour stylos injecteurs sont testées conformément à la norme ISO 11608-2:2012; elles sont totalement fonctionnelles et sont plus sûres lorsqu'elles sont utilisées avec les stylos injecteurs mentionnés sur la boîte des aiguilles mylife™ Clickfine® AutoProtect™.

Convient à:

Stylos à insuline

AstraZeneca Ltd.



BYETTA™

Berlin Chemie AG / Haselmeier GmbH



BerliPen® areo 2



BerliPen® PRECISION

Eli Lilly and Company



HumaPen® Luxura HD



HumaPen® SAVVIO™



KwikPen™

Novo Nordisk A/S



NovoPen® 4




NovoPen® 5



FlexPen®



FlexTouch®

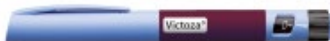

Victoza®



NordiPen®

Sanofi



AIISTAR®



ClikSTAR®

Sanofi



Lixumio® Pen



SoloSTAR®



JuniorSTAR®



Toujeo SoloSTAR®



TactiPen®

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.



Gansulin Pen

Ypsomed AG



ServoPen®



YpsoPen®

Autres stylos

Genentech, Inc.



Nutropin AQ Pen®

Merck Sharp & Dohme Corp.



Puregon Pen®

Pfizer Ltd.




Genotropin® GoQuick™




Genotropin Pen®

Certains stylos injecteurs ne sont pas disponibles dans tous le pays. En cas de question, veuillez vous au fabricant du stylo injecteur. Toutes les marques sont des marques commerciales des fabricants mentionnés. Lors de l'utilisation des aiguilles de sécurité pour stylos injecteurs mylife™ Clickfine® AutoProtect™, veuillez respecter leurs consignes d'utilisation, ainsi que celles du stylo injecteur.


mylife™ Clickfine® AutoProtect™ Fonctionnement

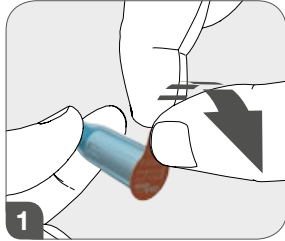


Retirez la pellicule de protection.

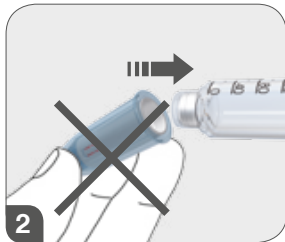


Ne pas tenir le dispositif incliné au moment de cliquer sur ce dernier pour l'enclencher.

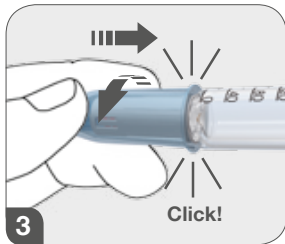

Cliquer (ou visser) le système mylife™ Clickfine® AutoProtect™ **obligatoirement droit** sur le stylo injecteur. Fixez l'aiguille en la vissant. L'aiguille vissée est bien fixée même s'il n'y a pas de butée nette en fin de vissage.

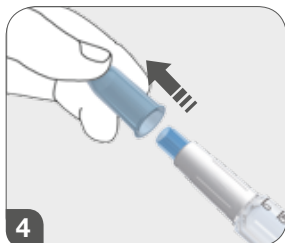


Retirez le capuchon protecteur. L'indication de verrouillage rouge n'est pas visible.

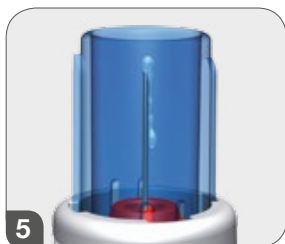


Avant de l'injection, vérifiez le bon débit du médicament en effectuant un test de fonctionnement conformément aux instructions d'utilisation de stylo injecteur. Réglez le dosage les instructions de votre médecin ou personnel de santé.




N'appuyez pas sur le bouton de dosage pendant l'injection.

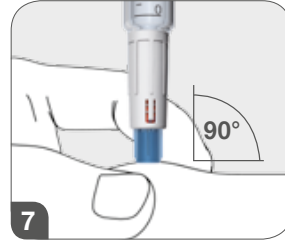


Placer le stylo injecteur en le maintenant verticalement, à un **angle de 90°**, sur le site d'injection choisi. Pour éviter une injection dans le muscle, il peut s'avérer nécessaire de former un pli cutané.

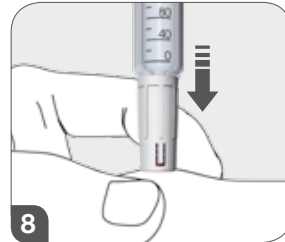


Appliquez une légère pression sur le stylo injecteur jusqu'à ce que la douille de protection bleue ne soit plus visible.

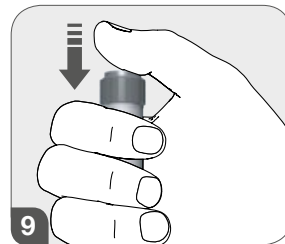

Appuyer sur le bouton de dosage et administrer l'injection lentement, puis laisser l'aiguille encore 10 secondes dans le tissu adipeux, selon les instructions de votre médecin ou personnel de santé.

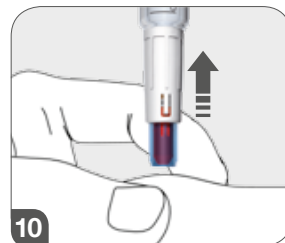

Retirez le stylo injecteur à 90 degrés (perpendiculaire à la peau) du site d'injection. Le verrouillage de la douille de protection bleue est automatique, et l'indication de verrouillage rouge apparaît.

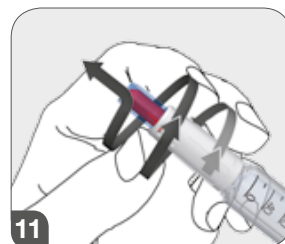

Dévissez l'aiguille mylife™ Clickfine® AutoProtect™ du stylo injecteur.



Éliminez l'aiguille en toute sécurité conformément à la réglementation locale en vigueur.